









Recreativos Acuáticos Horadada S.L. C/ Mayor № 95, 2°C 03190 - Pilar de la Horadada (Alicante) Telfs.: +34 96 535 17 08 info@acuarea.com



# **SEATRAC MOVER**

#### Acceso independiente al mar para personas con movilidad reducida desmontable


## **DESCRIPCIÓN**

Seatrac mover es la solución de acceso independiente al mar para personas con movilidad reducida desmontable. Un acceso al mar sin asistencia fácil de instalar. Solo son necesarios unos minutos para colocarlo en la playa y para desmontarlo y guardarlo. Es la opción más conveniente para playas que sufren cambios de marea o cambios vrepentinos de las condiciones climáticas.

También se puede retirar de la playa sin desmontar.



#### **PARTES DEL SEATRAC**

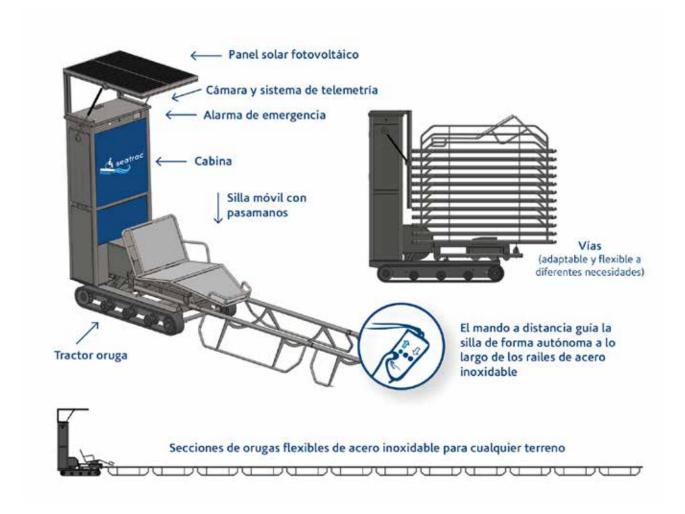

#### **ESPECIFICACIONES**

- Acero inoxidable 316.
- Tejido sintético perforado y antifúngico para el asiento.
- Panel solar y baterías recargables.
- Motor eléctrico de 12 v.
- Fácil montaje y desmontaje.
- Asiento ergonómico.
- Tamaño de los raíles 1,50m.
- Panel solar integrado.
- Control remoto.
- Instrucciones de utilización.

Mantenimiento después del primer año de funcionamiento.














## CABINA DE ALMACENAJE Y VESTUARIO OPCIONAL

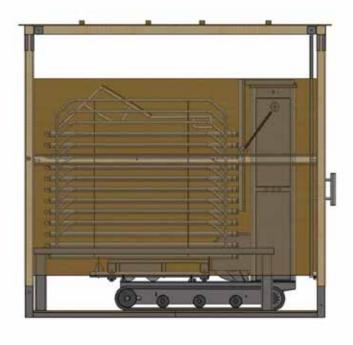



#### **UN DÍA CON SEATRAC MOVER**

## 1 COMIENZA EL DÍA

- Accede al dispositivo desde la cabina de almacenaje.
- Comprueba la batería.
- Muévelo a la playa.
- Desata y monta las secciones de la pista.
- Desplegar el panel solar.

# 2 DURANTE EL DÍA

- Verifique los niveles de marea varias veces durante el día.
- Ajustar el seatrac a la profundidad correcta.

# 3 AL FINAL DEL DÍA

- Desmontar el dispositivo.
- Muévelo al trastero.
- Opcional: Enchufe el cargador.



